


HOT SPAXUS™

Punta del Catéter con Electrocauterio

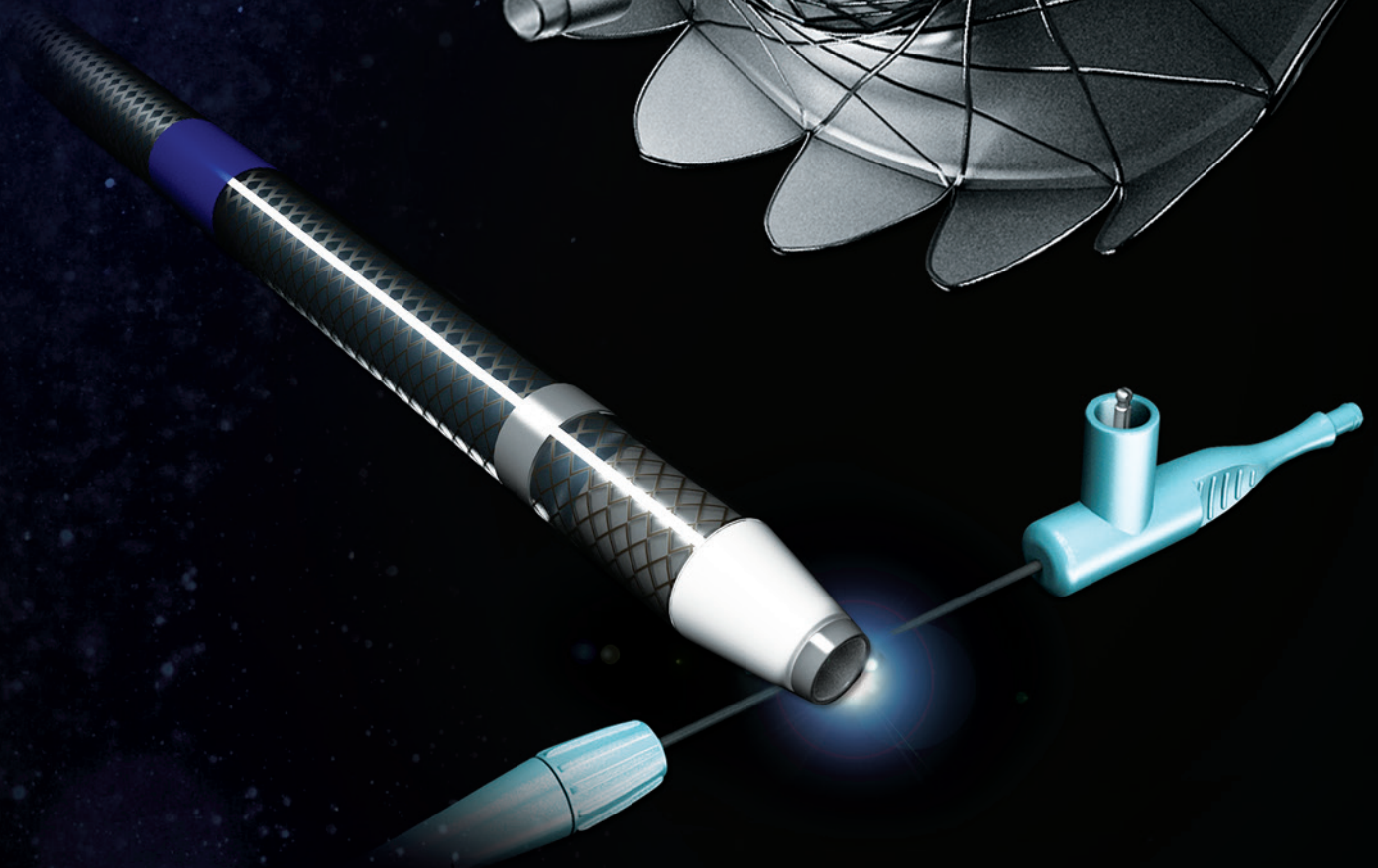

*Su intuitivo sistema de liberación permite un drenaje mediante EUS
Simple, Fácil y Seguro*

HOLT
MEDICAL


Arquímedes No. 37, Polanco, Miguel Hidalgo,
C.P.11560 CDMX Tel: (55) 5575-6163
contacto@grupoholt.com.mx


TaeWoong
MEDICAL 

www.taewoongmedical.com

Prótesis de aposición luminal SPAXUS™

- Previene la migración y mantiene un conducto anastomótico entre los dos órganos adyacentes
- El diseño flexible de las cabezas permite una aposición confortable independientemente del grosor de la pared
- Con diámetros de 8, 10, 16 mm para distintas indicaciones.

Producto	Referencia	Prótesis			Catéter	
		Diámetro Cuerpo (mm)	Diámetro Cabezas (mm)	Longitud (cm)	Diámetro (Fr)	Longitud Útil (cm)
	HSS0802FW	8	23	2	10	180
	HSS1002FW	10	25			
	HSS1602FW	16	31			

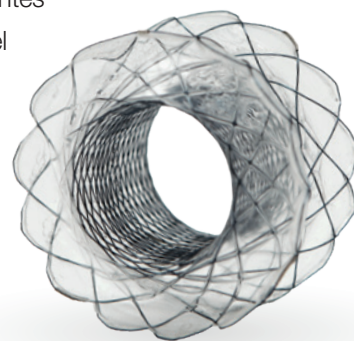

Sistema de liberación con electrocauterio

- Elija el tipo de placa especificada por el fabricante del electrobisturí
- Seleccione el modo de Corte Puro con 80-120 W y 400-500Vp
- Enchufe el conector al electrobisturí con un cable activo compatible



Colocación de HOT SPAXUS™

- Paso 1. Cuando la marca externa de Rayos X coincida con la marca interna
→ La cabeza distal de la prótesis está completamente abierta
- Paso 2. Cuando la marca azul es visible bajo visión endoscópica
→ Comience a abrir la cabeza proximal de la prótesis